

STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό



- Διάλυμα έτοιμο για χρήση: Απουσία ενεργοποιητή
- Δραστικό έναντι βακτηρίων, ζυμών, μυκήτων, ιών και μυκοβακτηρίων σε 10 λεπτά
- Δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητας του απολυμαντικού διαλύματος με δείκτες ελέγχου (κάθε 4 ώρες)
- Σταθερότητα του διαλύματος κατά την χρήση: 30 ημέρες

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υψηλού βαθμού απολύμανση ιατροτεχνολογικών συσκευών, χειρουργικού, ιατρικού, ενδοσκοπικού και θερμομειστήτου εξοπλισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαυγές πράσινο διάλυμα.
- Δραστικό έναντι του ελικοβακτηρίου του πυλωρού.
- Διάλυμα γλουταραλδεΐδης 2% ρυθμισμένο σε pH 6 (κιτρικό νάτριο).
- Το Steranios 2% NG και το Steranios 2% ECS περιέχουν συστατικά για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάτμισης της γλουταραλδεΐδης
- Ευρεία συμβατότητα με όλα τα υλικά
- Χρόνος ζωής: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κάθε είδους καθαριστικό προ-απολυμαντικό προϊόν.

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ






STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

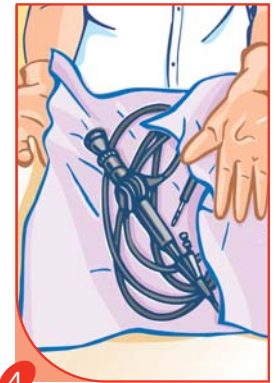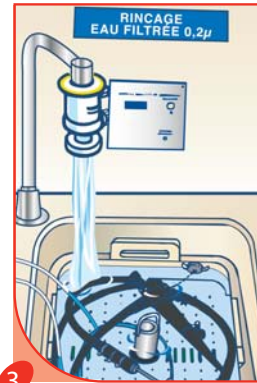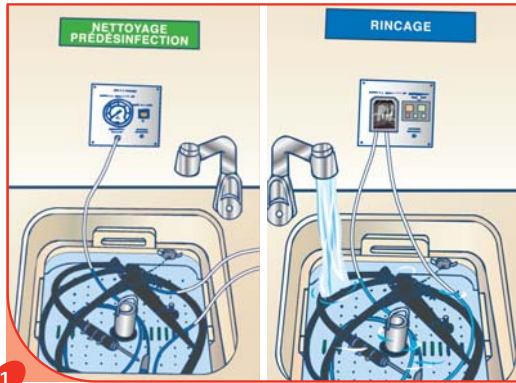

Βήμα προ απολύμανσης: καθαρίστε την ιατρική συσκευή με ένα προϊόν όπως τα ANIOSYME DD1, ANIOSYME DLT PLUS, HEXANIOS G+R ή ANIOSYME PLA II. Ξεπλύνετε προσεκτικά.

Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής.

Βήμα απολύμανσης: προσθέστε το διάλυμα. Καλύψτε την λεκάνη.

Χρόνος επαφής: 10 λεπτά για βακτηριοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο δράση. **Μέγιστη διάρκεια χρήσης του διαλύματος βυθισμού: 30 ημέρες.**

Ξεπλύνετε προσεκτικά την ιατρική συσκευή με στείρο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 µm).

Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής.

Στεγνώστε με πετσέτα μιας χρήσεως.

Διατηρήστε την ιατρική συσκευή σε όσο το δυνατό άσηπτες συνθήκες μέχρι την επόμενη χρήση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Το STERANIOS 2% είναι διάλυμα γλουταραλδεύδης 2% (εκφρασμένο σε 100% ενεργό συστατικό), ρυθμισμένο σε pH 6 παρουσία επιφανειοδραστικού καταλύτη. Τα Steranios 2% NG και Steranios 2% ECS περιέχουν δύο συστατικά που περιορίζουν την εξάτμιση της γλουταραλδεύδης όταν συνδυάζονται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Επικίνδυνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης (σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών ουσιών).

Αποθήκευση από +5°C έως +35°C. Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

STERANIOS 2%, Χαρτοκιβώτιο με 4 δοχεία των 5 λίτρων.....κωδ. είδους 382.034

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ EN ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΔΥ86/1348

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βακτηριοκτόνο (EN 13727, EN 14561, Helicobacter pylori),
Μυκοβακτηριοκτόνο (EN 14348, EN 14563, Mycobacterium massiliense),
Ζυμοκτόνο / μυκητοκτόνο (EN 13624, EN 14562),
Ιοκτόνο (EN 14476): Poliovirus, Adenovirus, MNV ; ενεργό έναντι των HIV-1, HBV, BVDV, (υποκατάστατο του HCV και HSV) : 10 minutes.
Η σποροκτόνος δράση (EN 13704) αποδεικνύεται για παρατεταμένους χρόνους επαφής
Όλη η αντιμικροβιακή δραστηριότητα του προϊόντος περιλαμβάνεται στον επιστημονικό του φάκελο, που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

